

Produktinformation Profi-Maske

1. Allgemeine Produktinformation

Die Profi-Maske ist eine Behelfs-Mund-Nasen-Maske, auch „Community-Maske“ genannt. Die Profi-Maske ist vorgesehen zur Bedeckung von Mund und Nase und besteht aus zwei Teilen: Einer elastischen und komfortablen Maske, sowie einem Träger. Dazu wird ein einstellbares Kopfband geliefert. Durch Fixierung eines geeigneten Filters in der dafür vorgesehenen Öffnung und bei geeigneter Handhabung kann die Gesichtsmaske dazu beitragen, die Geschwindigkeit des eigenen Atemstroms oder Speichel- /Schleim- /Tröpfchen-Auswurfs, z.B. bei Husten, zu reduzieren. Wir empfehlen als Filtermaterial den im Shop erhältlichen Filter.

Die Maske dichtet an den Rändern ergonomisch ab und schützt den Träger vor unterbewussten Berührungen der Lippen, der Nase und des Gesichts, und damit vor Selbstinfizierung über die Hände. Sie kann mit dem mitgelieferten Kopfband individuell eingestellt werden und ist für die Gesichtszüge eines Erwachsenen konzipiert. Die Profi-Maske ist weder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS), noch ein Gegenstand von persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Die Profi-Maske ist NICHT medizinisch geprüft oder anderweitig zertifiziert und verfügt über

keine nachgewiesene fremd- oder eigen-schützende Wirkung. Die Maske ist bei Auslieferung nicht desinfiziert.

2. Anwendung

Die Profi-Maske ist eine Mehrwegmaske und spülmaschinengeeignet*. Vor jeder Anwendung sollten die Maske und der Träger entweder in der Spülmaschine (60-80°C), in heißem Wasser (60-80°C) oder mit einem geeigneten Desinfektionsspray gereinigt werden. Entnehmen Sie vor der Reinigung den Filtereinsatz und ersetzen Sie den Filter nach der Reinigung. Entfernen Sie vor der Reinigung die Gummi-Kopfbänder und bringen Sie diese nach der Reinigung mithilfe der Clipse erneut an. Das Kopfband ist bei bis zu 60 °C waschbar. Wir empfehlen, das Kopfband mithilfe eines geeigneten Wäschesacks in der Waschmaschine zu reinigen.

*Hinweis zu Farbveränderungen:

Stark färbende Lebensmittel, wie Karotten, Ei, Spinat, Blaubeeren, Rote Bete, etc., die Karotin oder andere Farbstoffe enthalten, können in der Spülmaschine auch in geringen Mengen zu Verfärbungen der Maske führen. Diese Verfärbungen beeinträchtigen in keiner Weise die Verwendungsfähigkeit der Maske.

3. Empfehlung zum korrekten Anlegen der Gesichtsmaske

1. Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie die Maske anlegen.
2. Legen Sie das Filtermaterial in die dafür vorgesehene Öffnung des Trägers. Das Filtermaterial sollte die Öffnung möglichst abdecken. Die Profi-Maske darf nicht ohne Filtermaterial verwendet werden.
3. Verbinden Sie die Maske mit dem Träger.
4. Setzen Sie die Maske an Ihr Kinn an, die Abdichtung für den Nasenbereich muss sich hierfür an der oberen Seite befinden.
5. Anschließend legen Sie die obere Seite an Ihr Gesicht an. Die Maske sollte Nase und den Mundbereich komplett abdecken.
6. Die Schlaufe des Kopfbands wird am Hinterkopf oder Hals angelegt.
7. Testen Sie vor der ersten Anwendung, ob die Profi-Maske fest und bequem sitzt, und ob Sie gut Luft bekommen. Sollte die Profi-Maske zu fest oder locker anliegen, können Sie die Länge des Kopfbands entsprechend anpassen.
8. Die Profi-Maske ist ausschließlich zur Bedeckung von Mund und Nase anzuwenden.
9. Bei Durchfeuchtung der Maske sollte diese abgesetzt und gereinigt oder gewechselt werden.

Produktinformation **Profi-Maske**

4. Entsorgung

Bitte halten Sie sich bei der Entsorgung der Profi-Maske sowie der Verpackung an die regional geltenden Entsorgungsvorschriften sowie die jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen. Die verwendeten Materialien für die Profi-Maske und den Träger sind Thermoplastische Elastomere.

5. Hinweise des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)


Zur allgemeinen Information im Zusammenhang mit den verschiedenen Typen von Masken zur Bedeckung von Mund und Nase, beachten Sie bitte auch die Empfehlungen des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Dies gilt insbesondere für die dortigen Empfehlungen der gängigen Hygienevorschriften, insbesondere des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und zur Handhabung von Mund-Nase-Bedeckungen.

<https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html>

Stand 14.08.20

Sicherheits-Hinweise:

1. Die Profi-Maske sollte nur zur Eigennutzung verwendet werden.
2. Auch durch den Einsatz von zertifiziertem medizinischem Vlies als Filtervlieseinsatz entsteht keine medizinische Schutzmaske.
3. Die Maske und/oder der Träger müssen sofort entsorgt werden, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
4. Nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen an der Profi-Maske vor.
5. Verwenden Sie die Profi-Maske nicht in kontaminierten Bereichen. Die Profi-Maske verfügt über keine nachgewiesene fremd- oder eigenschützende Schutzwirkung.
6. Wenn die Maske oder der Träger porös ist, dürfen diese Komponenten nicht mehr verwendet werden.

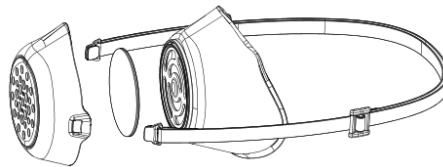

Wir freuen uns auf Ihr Feedback

Die Profi-Maske ist ein Produkt der
Fermatech GmbH
Industriestraße 14
D-85072 Eichstätt
Telefon: +49 (0) 8421 90777 250
E-Mail: mail@profi-maske.de

Revision: 1.2, Stand: 17.11.2020

Da es sich bei der Profi-Maske um ein Hygieneprodukt handelt, ist die Maske vom Umtausch ausgeschlossen. Das Rückgaberecht greift nur bei ungeöffneter Verpackung mit unbeschädigtem Siegel.